

URINSKI KATETER ŠT.1 CH10

Koda izdelka: 55505

URINSKI KATETER ŠT.2 CH12

Koda izdelka: 55515

NAVODILO ZA UPORABO

Za enkratno uporabo. Sterilno. Sterilizirano z etilen oksidom.

OPOZORILO:

Ne uporabljaj, če je ovojnina poškodovana, ali če zaščitni pokrovčki niso trdno pritrjeni. Shranjevati pri sobni temperaturi.

NAMEN UPORABE:

Urinski kateter se uporablja se za kateterizacijo sečnega mehurja predvsem na uroloških, ginekoloških oddelkih ter za domačo oskrbo bolnikov.

PRIPRAVA ZA UPORABO:

1. Pred uporabo preverite, da ovojnina ni poškodovana.
2. Na označenem mestu »Odpri tukaj« odprite ovojnino.
3. Sterilni kateter izvlcite s pomočjo sterilnega inštrumenta ali sterilne orokavičene roke (desne roke) in ga primite 4-5 cm pred distalno konico.
4. Prosti konec katetra primite med palec-kazalec desne roke, namočite uvodno konico v sterilno fiziološko raztopino, drugo sterilno raztopino ali sterilni gel po strokovnih standardih.
5. Očistite periuretralno področje s sterilno fiziološko raztopino ali z antiseptičnim sredstvom skladno s strokovnimi standardi.
6. Razkužite odprtino sečnega kanala.
7. Prost konec katetra nastavite v posodo za urin ali v urinsko vrečko.
8. Pri upoštevanju pravil asepse, vstavite kateter v odprtino sečnega kanala, tako da se urin izteka.
9. Po izpraznitvi mehurja izvlcite kateter iz sečnice.
10. Očistite sečno odprtino s sterilnim tamponom.
11. Izdelek zavržite po predpisanem postopku.

RAZLAGA SIMBOLOV NA ETIKETAH:



Proizvajalec



Izdelek za enkratno uporabo



Referenčna koda zasledljivosti izdelka



Rok uporabnosti izdelka (veljavnost sterilizacije)



Mesec in leto izdelave (sterilizacija)



Sterilizacija z etilen oksidom



Opozorilo (glej dodatne opombe)



Izdelek vsebuje ftalate



V skladu s standardom EU