



NIOLAV

Sterilni medicinski pripomoček za izpiranje debelega črevesa s sterilno fiziološko raztopino za enkratno uporabo.

Kdaj se uporablja Niolav?

- za hitrejše odvajanje pri občasnem ali kroničnem zaprtju
- za zmanjševanje trebušne napihnjenosti (meteorizem)
- za odvajanje iz debelega črevesa (razstrupljanje in čiščenje)
- za hitrejše odvajanje blata iz debelega črevesa
- za medicinske indikacije po zdravniškem navodilu

Navodila za uporabo

1. Roke si dobro umijte z milom.
2. Odstranite zunanji ovitek vrečke s fiziološko raztopino.
3. Segrejte raztopino na temperaturo, približno od 35-40°C tako, da vrečko potopite v umivalnik z vročo vodo.
4. Odprite ovitek, ki vsebuje medicinski pripomoček za črevesno izpiranje; cevko s konico za izpiranje na enem koncu in plastično iglo na drugem.
5. Na vrečki s fiziološko raztopino odstranite zaščitni pokrovček na koncu ene od dveh cevk.
6. Odstranite zaščitni pokrovček plastične igle na enem koncu črevesne cevke.
- Bodite zelo pazljivi, da se ne poškodujete med rokovanjem s plastično iglo.**
7. Medtem, ko v eni roki držite segreto vrečko, v drugi roki konec tiste cevke, s katere ste odstranili pokrovček, vstavite plastično iglo v cevko in prebodite vrečko.
8. Sedite na WC školjko. V eni roki držite vrečko, z drugo roko pa vstavite konico pripomočka za črevesno izpiranje v zadnjično odprtino, vse do omejevalca globine na pripomočku.
9. Z roko stisnite vrečko s fiziološko raztopino, dokler se vrečka popolnoma ne izprazni.
10. Odstranite pripomoček iz zadnjične odprtine.
11. Skozi drugo cevko na vrečki je možno v raztopino dodajati zdravilo, vendar le po posvetu z zdravnikom.

Sestava raztopine:

1000 ml raztopine vsebuje 9 g natrijevega klorida

Prodajno pakiranje:

Škatla vsebuje 4 vrečke z 250 ml raztopine in 4 medicinske pripomočke za črevesno izpiranje

Pozor:

- Raztopina ni primerna za injekcije.
- Raztopina se mora uporabiti takoj, ko se vrečka prebode.
- Navedeni rok uporabe na embalaži velja, če je bil izdelek pravilno shranjen in ovojnina zaprta.

Tveganja:

V primeru analnih ali črevesnih ran se pred uporabo posvetujte z zdravnikom

Po uporabi lahko vrečko in medicinski pripomoček odvržete med smeti.



Produced by PURLING S.r.l.
48022 Lugo (RA) Italy - Tel. +39 0545 34734
www.lavonase.com - E-mail: info@lavonase.com