

SISTEM ZA TRANSFUZIJO z mehkim kapalnikom

Koda izdelka: 54110

SISTEM ZA TRANSFUZIJO z dvokanalno iglo

Koda izdelka: 54125A

SISTEM ZA PERFUZIJO 2m, s plastično iglo

Koda izdelka: 54315A

NAVODILO ZA UPORABO

Za enkratno uporabo. Sterilno, apirogeno. Sterilizirano z etilen oksidom.

OPOZORILO:

Ne uporabljaj, če je ovojnina poškodovana, ali če zaščitni pokrovčki niso trdno pritrjeni. Shranjevati pri sobni temperaturi.

NAMEN UPORABE:

Sistem se uporablja za aplikacijo krvi iz steklenic ali plastičnih vrečk.

PRIPRAVA ZA UPORABO:

1. Pred uporabo preverite, da ovojnina ni poškodovana.
2. Na označenem mestu »Odpri tukaj« odprite ovojnino in izvlecite sistem.
3. Preverite, če pokrovčki na igli in luer lock priključku niso poškodovani.
4. Z regulatorjem pretoka zaprite cevko do konca.
5. Odstranite zaščitni pokrovček s plastične igle.
6. Izperite sistem s fiziološko raztopino.
7. Odstranite zaščitni pokrovček z vrečke ali stekleničke s krvnim pripravkom.
8. S plastično iglo prebodite membrano vrečke ali steklenice
9. Odprite regulator pretoka in odstranite pokrovček z priključka Luer Lock Male ter pustite, da se kapalnik napolni do polovice, oziroma da se cevka postopoma napolni z krvnim pripravkom do polnega izpusta zraka iz sistema.
10. Zaprite regulator pretoka.
11. Vizualno preverite sistem na odsotnost mehurčkov zraka.
12. Povežite sistem s kanilo nameščeno v žilo, s pomočjo priključka luer lock.
13. Z regulatorjem nastavite hitrost pretoka.
14. Po končanem postopku transfuzije ločite sistem od kanile.
15. Izdelek zavržite po predpisanem postopku.

RAZLAGA SIMBOLOV NA ETIKETAH:



Proizvajalec



Izdelek za enkratno uporabo



Referenčna koda zasledljivosti izdelka



Rok uporabnosti izdelka (veljavnost sterilizacije)



Mesec in leto izdelave (sterilizacija)



Sterilizacija z etilen oksidom



Opozorilo (glej dodatne opombe)



Izdelek vsebuje ftalate



V skladu s standardom EU