

CEV ZA ZUNANJO SUKCIJO 2m

Koda izdelka: 55195

NAVODILO ZA UPORABO

Za enkratno uporabo. Sterilno. Sterilizirano z etilen oksidom.

OPOZORILO:

Ne uporabljaj, če je ovojnina poškodovana, ali če zaščitni pokrovčki niso trdno pritrjeni. Shranjevati pri sobni temperaturi.

NAMEN UPORABE:

Cev se uporablja za aspiracijo tekočin iz operacijskega polja in iz ustne votline.

PRIPRAVA ZA UPORABO:

1. Pred uporabo preverite, da ovojnina ni poškodovana.
2. Na označenem mestu »Odpri tukaj« odprite ovojnino in izvlecite cev.
3. S pomočjo priključka cev povežite z aspiratorjem na eni strani in z aspiracijskim katetrom na drugi.
4. Po končanem postopku ločite cev od aspiracijskega katetra in aspiratorja.
5. Izdelek zavržite po predpisanem postopku.

RAZLAGA SIMBOLOV NA ETIKETAH:



Proizvajalec



Izdelek za enkratno uporabo



Referenčna koda zasledljivosti izdelka



Rok uporabnosti izdelka (veljavnost sterilizacije)



Mesec in leto izdelave (sterilizacija)



Sterilizacija z etilen oksidom



Opozorilo (glej dodatne opombe)



Izdelek vsebuje ftalate



V skladu s standardom EU