

ČREVESNA SONDA ŠT.3 CH34

Koda izdelka: 55725

NAVODILO ZA UPORABO

Za enkratno uporabo. Sterilno. Sterilizirano z etilen oksidom.

OPOZORILO:

Ne uporabljaj, če je ovojnina poškodovana, ali če zaščitni pokrovčki niso trdno pritrjeni. Shranjevati pri sobni temperaturi.

NAMEN UPORABE:

Črevesna sonda se uporablja za dodajanje zdravil ali za drenažo debelega črevesa.

PRIPRAVA ZA UPORABO:

1. Pred uporabo preverite, da ovojnina ni poškodovana.
2. Na označenem mestu odprite ovojnino in izvlecite sondo.
3. Primite sondo z desno roko in jo namažite z vazelinom.
4. Sondo vstavite v črevo do globine 15-20 cm
5. Zunanji konec sonde naj izstopa iz zadnjične odprtine približno 10 cm
6. Po končanem postopku izvlecite sondo in jo zavržite po predpisanem postopku.

RAZLAGA SIMBOLOV NA ETIKETAH:



Proizvajalec



Izdelek za enkratno uporabo



Referenčna koda zasledljivosti izdelka



Rok uporabnosti izdelka (veljavnost sterilizacije)



Mesec in leto izdelave (sterilizacija)



Sterilizacija z etilen oksidom



Opozorilo (glej dodatne opombe)



Izdelek vsebuje ftalate



V skladu s standardom EU