

AROMAFORCE PRŠILO ZA NOS, certificirano s strani ECOGARANTIE® 15 ml

Hypertonic decongestant spray for nasal use

1. KDAJ UPORABITI AROMAFORCE PRŠILO ZA NOS ?

- Aromaforce pršilo za nos je hipertonična raztopina, povezana s 100% organskimi eteričnimi olji. Eterična olja, pridobljena iz *Mandravasarotra*, *Eucalyptus radiata* in *Pelargonije* so poznana po svojih prečiščevalnih, osvežujočih in pomirjujočih lastnostih.

- Ta izdelek se uporablja za simptomatsko zdravljenje zamašenega nosu, vključno s prehladom in faringitisom. Dekongestant odpravlja sluz in vir bakterijske okužbe, medtem ko preprečuje suhost sluznice. Zaradi vsebnosti eteričnih olj daje občutek svežine.

Aromaforce pršilo za nos ne povzroča zasvojenosti.

Ta izdelek je medicinski pripomoček. Če boste potrebovali dodatne informacije in nasvete, se obrnite na svojega lokalnega farmacevta. V primeru, da simptomi ne prenehajo po desetih (10) dneh, obiščite vašega osebnega zdravnika.

2. POMEMBNE INFORMACIJE, KI JIH JE POTREBNO PREBRATI PRED UPORABO AROMAFORCE PRŠILA ZA NOS

a. Navodila za uporabo

Pršilo porabite v roku 30 dni od odprtja. • Ne uporabljajte za otroke, mlajše od 3 let, razen če vam to svetuje vaš farmacevt ali zdravnik. • Ne vsebuje mete ali mentola. • Ne uporabljajte izdelka, v kolikor imate alergijo na eno od sestavin (glej sestavine, točka 6) • Hranite izven dosega otrok. • Hranite v hladnem, temnem in suhem prostoru. • Ne prekoračite priporočenega odmerka.

b. Nosečnost in dojenje

Izdelek lahko uporabljate tudi v primeru nosečnosti ali dojenja.

c. Vožnja vozila ali upravljanje s stroji

Ni tveganj.


3. KAKO UPORABLJATI AROMAFORCE PRŠILO ZA NOS

- Stekleničko pred uporabo pretresite.

- Odstranite pokrovček, postavite palec na dno stekleničke, kazalec in sredinec pa na obroč okrog razpršilnega nastavka. Ob prvi uporabi nekajkrat pritisnite, da se sproži razprševanje (sl. 1).

- Ko se mikro-dozirnik sproži (ob prvi uporabi), vstavite razpršilni nastavek v nosnico in razpršite medtem, ko vdihnete (sl. 2).

- Po vsaki uporabi izperite razpršilni nastavek pod vročo vodo in pustite, da se posuši; šele nato pokrijte s pokrovčkom.

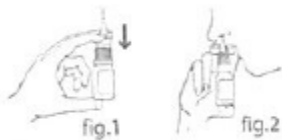

Nasvet za uporabo: Pršenje v nos

Odrasli, mladi (> 12 let), nosečnice / doječe ženske: Po brisanju nosu, od 1 do 4-krat razpršite v vsako nosnico, 1 do 5-krat na dan.

Otroci od 6 do 12: Po brisanju nosu, 1 do 2-krat razpršite v vsako nosnico, 1 do 5-krat dnevno.

Otroci od 3 do 6: Po brisanju nosu, 1-krat razpršite v vsako nosnico, 1 do 5-krat dnevno.

V primeru, da simptomi ne prenehajo po desetih (10) dneh, se obiščite vašega osebnega zdravnika.

Prekomerni odmerek: Če ste uporabili preveč Aromaforce pršila za nos, se obrnite na vašega osebnega zdravnika ali farmacevta

4. STRANSKI UČINKI

V primeru občutljivosti nosu se lahko pojavi rahlo mravljinčenje. Če opazite nezaželen stranski učinek, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

5. KAKO HRANITI AROMAFORCE PRŠILO ZA NOS ?

Izdelek skladiščite pri temperaturi med 15°C in 35°C v originalni embalaži.

Rok uporabe: Pršila za nos Aromaforce ne uporabljajte po datumu izteka roka uporabnosti, ki je natisnjen na embalaži v obliki mesec / leto.

Pršilo porabite v 30 dneh od odprtja.

6. KATERE SESTAVINE VSEBUJE AROMAFORCE?

Voda, *Hamamelis virginiana* ekstrakt, natrijev klorid, natrijev benzoat, kalijev sorbat, propolis ekstrakt (0,3%), Eterična olja (0,1%): *Cinnamosma fragrans* olje (*Mandravasarotra*), olje listov *Picea Monona* (Črna smreka), olje listov *Eucalyptus radiata* (*Eucalyptus radiata*), olje vejic *Cistus Ladiniferus* (*Labdanum*), olje *Myrtus communis* (*Honey myrtle*), olje *Pelargonium graveolens* (*Geranium*), ksantan gumi.



Proizvajalec: Pranaróm Trance, rue Delaltre de Tassigny, 8 - 59000 Lille/Francija

Faks FR: +33 (0)3 20 07 64 46 – Faks BE: +32 (0)68 331 897 - Fax ES: + 34 93 674 31 35

Za več informacij o naši ponudbi obiščite: www.pranarom.com Datum objave: 12/2013