

EPRUVETA ZA ODVZEM BRISA

Koda izdelka: 56010

NAVODILO ZA UPORABO

Za enkratno uporabo. Sterilno. Sterilizirano z etilen oksidom.

OPOZORILO:

Ne uporabljaj, če je ovojnina poškodovana, ali če zaščitni pokrovčki niso trdno pritrjeni. Shranjevati pri sobni temperaturi.

NAMEN UPORABE:

Epruveta se uporablja za odvzem brisa.

PRIPRAVA ZA UPORABO:

1. Pred uporabo preverite, da ovojnina ni poškodovana.
2. Na označenem mestu »Odpri tukaj« odprite ovojnino in epruveto.
3. Odprite pokrovček epruvete in odzemite bris.
4. Vstavite pokrovček s palčko nazaj v epruveto.
5. Na etikete/signaturi napišite ime, priimek pacienta, ustanovo.
6. Po opravljeni laboratorijski analizi zavrzite izdelek po predpisanem postopku.

RAZLAGA SIMBOLOV NA ETIKETAH:



Proizvajalec



Izdelek za enkratno uporabo



Referenčna koda zasledljivosti izdelka



Rok uporabnosti izdelka (veljavnost sterilizacije)



Mesec in leto izdelave (sterilizacija)



Sterilizacija z etilen oksidom



Opozorilo (glej dodatne opombe)



V skladu s standardom EU