

SISTEM ZA DAJANJE KOSTNEGA MOZGA

Koda izdelka: 54517A

NAVODILO ZA UPORABO

Za enkratno uporabo. Sterilno, apirogeno. Sterilizirano z etilen oksidom.

OPOZORILO:

Ne uporabljaj, če je ovojnina poškodovana, ali če zaščitni pokrovčki niso trdno pritrjeni. Shranjevati pri sobni temperaturi.

NAMEN UPORABE:

Sistem se uporablja za transfuzijo kostnega mozga.

PRIPRAVA ZA UPORABO:

1. Pred uporabo preverite, da ovojnina ni poškodovana
2. Na označenem mestu odprite ovojnino in izvlecite sistem
3. Preverite, da pokrovčki sistema niso poškodovani
4. Pripravite 2 raztopini NaCl (1x 250ml, 1x 500ml) oz. odvisno od potreb
5. Odprite fiziološke raztopine in razkužite
6. Počakajte, da se razkužilo posuši
7. Zaprite vse stiščke na sistemu za tkm
8. Snamite pokrovčke s sistema in prebodite NaCl 0,9% na predvidenem mestu
9. Ko prebodete NaCl odprite zgornja stiščka in napolnite rezervoar infuzijskega sistema za transfuzijo kostnega mozga
10. Ko je rezervoar napolnjen, odprite še spodnji stišček in odzračite celoten sistem

RAZLAGA SIMBOLOV NA ETIKETAH:



Proizvajalec



Izdelek za enkratno uporabo



Referenčna koda zasledljivosti izdelka



Rok uporabnosti izdelka (veljavnost sterilizacije)



Mesec in leto izdelave (sterilizacija)



Sterilizacija z etilen oksidom



Opozorilo (glej dodatne opombe)



Izdelek vsebuje ftalate



V skladu s standardom EU