

Eier CHECK[®]

Alergični na jajca? Preverite doma!

...zgodnje odkritje lahko obvaruje

NAVODILA ZA UPORABO

OSNOVE TESTA

EierCHECK IgE Allergy Test je enostaven, varen in natančen način za odkrivanje visoke ravni alergijskih protiteles, imenovanih imunoglobulin E (IgE) v krvi. Visoka raven IgE je povezana s povečanim sumom na alergijo na jajca. Za test je potrebna samo majhna količina krvi, ki se pridobi na higieničen način in z minimalnim nelagodjem. Rezultati EierCHECK testiranja so se dokazali kot dobro primerljivi z laboratorijskimi testi, vendar pa nobena od teh metod diagnosticiranja alergije ni popolnoma natančna. Pri otrocih, mlajših od 16 let, morajo testiranje izvesti starši. Test se lahko uporabi v kateremkoli delu leta. Pri tem ni nujno, da imate alergijsko reakcijo ravno v času izvajanja testa. Prav tako pred uporabo tega proizvoda ni potrebno prenehati z jemanjem zdravil.

VSEBINA KOMPLETA ZA TESTIRANJE

- 1 letak z navodili
- zavoj, ki vsebuje eno sterilno lanceto, eno cevko za kri in eno cevko raztopine razvijalca.
- vrečko folije, ki vsebuje testno enoto in sušilno vrečko. Sušilna vrečka mora biti rumena ali svetlo zelenkasto rumena, da učinkuje; v primeru, da je zelena, se obrnite na vašega lokalnega distributerja/prodajalca. Potrebno boste tudi uro in čisto papirnato brisačo.

Hranite izven dosega otrok, NE vstavljajte v usta!

PRIPRAVA NA TESTIRANJE

Komplet za testiranje je potrebno hraniti in uporabljati pri normalni sobni temperaturi. V primerih hrambe pri veliko nižji temperaturi pustite neodprt komplet najmanj dve uri na sobni temperaturi. Test je potrebno uporabiti najkasneje v 30 minutah zatem, ko odprete vrečko iz folije. Roke si operite z milom in toplo vodo, dobro izperite s toplo vodo in osušite s čisto brisačo – pomembno je, da so vaše roke tople in suhe, saj to izboljšuje pretok krvi in olajša jemanje vzorca krvi.

Za izvedbo testa si poiščite mirno mesto, po možnosti tako, kjer lahko sedite pred mizo. Nato odprite:

- zavoj, ki vsebuje sterilno lanceto, cevko za kri in cevko raztopina razvijalca;
- v folijo zavito testno enoto.

Ne povlecite in/ali ne premaknite modrega drsnika prej, kot to določajo navodila za uporabo (15 minut POTEM, ko ste dodali raztopino razvijalca).

- Vse dele položite na ravno površino.


JEMANJE KAPLJICE KRVI

To je zelo enostavno in povzroča zelo malo nelagodja. Potrebna je samo majhna kapljica krvi. NE uporabite lancete, če na njej manjka modri jeziček (označen z <=>).

- Z nežnim pritiskom zmasirajte prst, iz katerega nameravate vzeti kri (najbolje je iz sredinca ali iz prstanca) tako, da s palcem vaše roke večkrat NEŽNO zakrožite po konici prsta.
- Upognite in odtrgajte modri jeziček na lanceti, da se razkrije samosprožilen kontaktni del, ki je spodaj.
- S palcem in kazalcem vaše proste roke primite za stranska držala lancete ter ČVRSTO PRITISNITE bel kontaktni del ob mehko blazinico konice vašega prsta tako, da zaslišite klik.
- Igle se nemudoma povrne v lanceto, kar omogoča varno odstranitev; igle ni možno ponovno uporabiti. S pomočjo suhe papirnate brisače obrišite prvi znak krvi iz konice vašega prsta.

V kolikor vam uporaba lancete povzroča težave ali če ne morete pridobiti zadostne količine krvi, se obrnite na vašega lokalnega prodajalca / distributerja.


Pomembno je, da lanceto zelo čvrsto pritisnete proti konici prsta, saj lanceta v nasprotnem primeru ne bo prebodla kože.

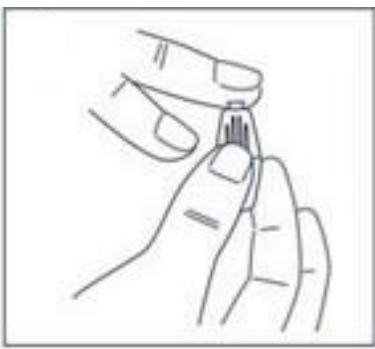

POBIRANJE KAPLJICE KRVI

1. S prstom, obrnjenim tako, da noht gleda navzgor, nadaljujte z NEŽNO masažo prsta na vaši PROSTI ROKI proti konici prsta tako, da se pojavi VELIKA KAPLJICA krvi.
2. S prstom, obrnjenim tako, da noht še vedno gleda navzgor, pridržite cevko HORIZONTALNO in prislonite konico cevi na kapljico krvi. Nadaljujte s pobiranjem krvi v cevko za kri, dokler kri do črt ne zapolni konice cevke.
3. Kapilarno delovanje bo avtomatično povleklo kri do črte za napolnjenost in jo nato ustavilo. POZOR: Polnjenje je avtomatično. Nikoli ne stiskajte cevke medtem, ko se polni s krvjo.

Uporaba prevelike ali premajhne količine krvi bo lahko dala nepravilen rezultat testa.

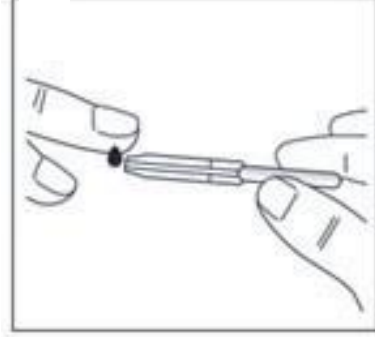

DODAJANJE KRVI V TESTNO ENOTO

Za izločitev krvi iz cevke postavite konico cevke na označeno MANJŠO odprtino testne enote. Nežno stisnite izboklino, da se kri izloči na dno odprtine. Če se kri noče iztočiti, pridržite cevko vertikalno nad odprtino, primite na eni strani črni oznak za nivo in stisnite izboklino. Počakajte približno 1 minuto, da se kri absorbira, nato cevko za kri zavrzite.




DODAJANJE RAZTOPINE RAZVIJALCA


Previdno odvijte pokrovček iz cevke z raztopino razvijalca in zlijte VSO vsebino cevke v VELIKO ODPRTINO tik poleg odprtine s krvjo. Nato počakajte točno 15 minut. NE PREMIKAJTE IN NE DVIGAJTE TESTNE ENOTE POTEM, KO STE DODALI RAZVIJALEC. Če cevka z razvijalcem ni popolnoma napolnjena s svetlo modro tekočino, nas pokličite!

POVLEK MODREGA DRSNIKA

Potem, ko ste počakali natančno 15 minut, dvignite testno enoto, jo pridržite HORIZONTALNO in povlecite modri drsni, dokler ne zaslišite, da se na mestu zaskoči. Indikator za delovanje testa 3 se bo spremenil iz modre v belo barvo. Testno enoto postavite nazaj na ravno površino in jo pustite mirovati. Če imate zelo visoko raven IgE protiteles, lahko vidite pozitivne rezultate že v 15 minutah. Vsekakor je potrebno počakati 30 minut zatem, ko ste povlekli za modri drsni, da se potrdi popolnoma negativen rezultat.

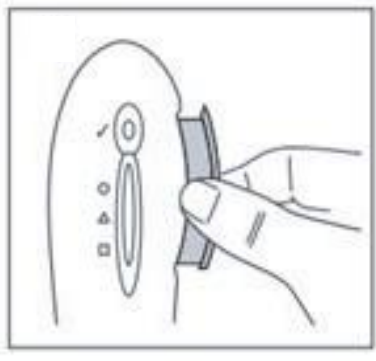

INTERPRETACIJA REZULTATOV

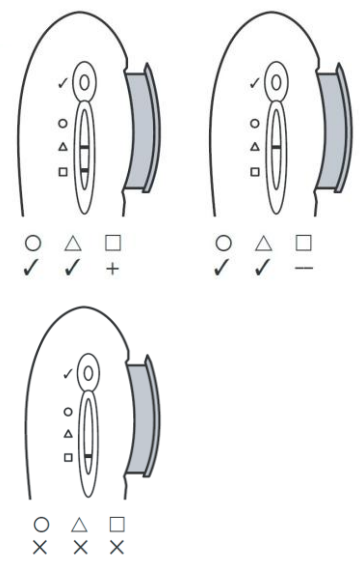

POMEMBNA INFORMACIJA

Brez predhodnega posveta z vašim osebnim zdravnikom ne sprejemajte sami nobenih odločitev o medicinski relevantnosti. V kolikor se ta test uporablja za nadzor obstoječe bolezni, vam ni dovoljeno, da sami spreminjate vaše terapije, razen če ste bili za to ustrezno usposobljeni.

ČIŠČENJE PO UPORABI TESTA

Za preprečevanje kontaminacije je potrebno po uporabi testno enoto, cevko za kri, cevko z raztopino razvijalca in uporabljeno lanceto odložiti v originalno škatlo in zapreti pokrov. Škatlo zavrzite v vaš smetnjak. NIKOLI NE razstavljajte testne enote. Hranite izven dosega otrok, ne vstavljajte delov v usta. Za pomoč nas pokličite!

NAPAČNI POZITIVNI IN NAPAČNI NEGATIVNI REZULTATI

Visoka raven IgE je lahko koristen pokazatelj tveganja za alergijo, vendar pa vam visoka raven IgE sama po sebi ne bo natančno pokazala, da gre za visoko tveganje, da trpite za alergijo ali da se alergija razvije. Pomembno je, da imate ali ste imeli alergijske simptome za pozitiven rezultat, ki so pomembni. Ravno tako ne more normalna raven popolnoma izključiti tveganja, da boste trpeli za alergijo ali da se bo alergija razvila v prihodnosti. Nekateri ljudje imajo lahko nenavadno visoko IgE raven, vendar pa ne trpijo za očitnimi simptomi. Alergiji se lahko upirajo zaradi prisotnosti zaščitnih protiteles (IgG) ali pa poredkoma prihajajo v stik z alergenii, ki lahko sprožijo simptome alergij. Vendar pa se simptomi pri njih še lahko razvijejo kasneje v življenju. Če imate revmatoidna obolenja (artritis), vas opozarjamo, da so lahko opazi zelo šibke pozitivne rezultate, tudi če nimate alergije. * **Zelo pomembno je, da takoj, ko se potrdi, da imate alergijo na hrano, poiščete zdravniško pomoč.** * Nikakor ne smete preverjati svoje občutljivosti na tak način, da bi uživali hrano, za katero sumite, da vam povzroča težave. Hranite, kot so jajca in mleko, se lahko odpoveste šele po posvetu z vašim prehranskim svetovalcem ali zdravnikom, saj nepotrebno odrekanje tej hrani lahko privede do prehranskih pomanjkljivosti.

Eier CHECK[®]









...zgodnje odkritje lahko obvaruje


Alergični na jajca? Preverite doma!

www.allergocheck.com


<p>Informacije o lanceti</p>  <p>B. D. Vaccines Systems NJ 07417-1885 USA Distributeri v Sloveniji: B. D. Pharmacy Hertford, U.K.</p>	<p>Informacije o alkoholnih blazinicah</p>  <p>HEINZ HERENZ GMBH Rudolfsweg 10-12 D-21031 Hamburg</p>	<p>Informacije o obližih</p>  <p>Soderroth AB Box 715, Görsnäsöden 10A) SE-194 27 Uppleåsda Växby SWEDEN</p>	<p>Informacije o pipetah</p>  <p>Safe-Tect Clinical Produce: Ivyland, PA 18974 USA</p>
<p>Prosimo pogledite na embalažo in/ali vrečko za podrobnosti glede označevanja in trajanja.</p>			

Razlaga simbolov:

 Upoštevajte navodila	 Samo za in vitro diagnostiko	 Rok trajanja Glejte odtis na embalaži.
 Hranite pri 2°C - 27°C. PAZITE, DA NE ZMRZNE!	 Število testov na embalažo	 Ni za ponovno uporabo.
 Proizvajalec	 Sterilizacija z žarčenjem	 Naročniška številka

CE0483 

Prevod navodil iz angleškega jezika
Revizija z dne 2013-04-08

Proizvajalec EierCHECK
 NanoRepro AG
 Untergasse 8
 D-35037 Marburg



Iz ljubezni do življenja.