

SISTEM ZA MERJENJE CVP

Koda izdelka: 55125A

NAVODILO ZA UPORABO

Za enkratno uporabo. Sterilno, apirogeno. Sterilizirano z etilen oksidom.

OPOZORILO:

Ne uporabljaj, če je ovojnina poškodovana, ali če zaščitni pokrovčki niso trdno pritrjeni. Shranjevati pri sobni temperaturi.

NAMEN UPORABE:

Sistem se uporablja za merjenje centralnega in venskega pritiska s pomočjo lesenega ali plastičnega ravnila ter z uporabo izotonske raztopine.

PRIPRAVA ZA UPORABO:

1. Pred uporabo preverite, da ovojnina ni poškodovana.
2. Na označenem mestu »Odpri tukaj« odprite ovojnino in izvlecite sistem
3. Preverite, če pokrovčki na igli in luer lock priključku niso poškodovani.
4. Povežite sistem z centralnim venskim katetrom.
5. Napolnite cevko oz. Y krak, ki je fiksiran na merski skali; ob tem naj bo krak do bolnika zaprt z regulatorjem pretoka.
6. S pomočjo regulatorja pretoka zaprite krak, ki vodi iz steklenice in odprite povezavo merska skala-bolnik.
7. Opazujte padanje vodnega stolpca in zabeležite vrednost, ko se stolpec ustavi in niha skladno z bolnikovim dihanjem.
8. Po končanem postopku ločite sistem od katetra.
9. Izdelek zavržite po predpisanem postopku.

RAZLAGA SIMBOLOV NA ETIKETAH:



Proizvajalec



Izdelek za enkratno uporabo



Referenčna koda zasledljivosti izdelka



Rok uporabnosti izdelka (veljavnost sterilizacije)



Mesec in leto izdelave (sterilizacija)



Sterilizacija z etilen oksidom



Opozorilo (glej dodatne opombe)



Izdelek vsebuje ftalate



V skladu s standardom EU