

**3-POTNI PETELINČEK MC nevtralen**

Koda izdelka: 56035

**4-POTNI PETELINČEK MC nevtralen**

Koda izdelka: 56040

**4-POTNI PETELINČEK MC rdeč**

Koda izdelka: 56042

**4-POTNI PETELINČEK MC moder**

Koda izdelka: 56043

**4-POTNI PETELINČEK MC s podaljškom 7cm**

Koda izdelka: 56050

**4-POTNI PETELINČEK MC s podaljškom 10cm**

Koda izdelka: 56052

**NAVODILO ZA UPORABO**

Za enkratno uporabo. Sterilno, apirogeno. Sterilizirano z etilen oksidom.

**OPOZORILO:**

Ne uporabljaj, če je ovojnina poškodovana, ali če zaščitni pokrovčki niso trdno pritrjeni. Shranjevati pri sobni temperaturi.

**NAMEN UPORABE:**

Petelinčki se uporabljajo za istočasno aplikacijo dveh infuzijskih raztopin.

**PRIPRAVA ZA UPORABO:**

1. Pred uporabo preverite, de ovojnina ni poškodovana.
2. Na označenem mestu »Odpri tukaj« odprite ovojnino in izvlecite petelinček.
3. Preverite da pokrovčki niso poškodovani.
4. Odstranite pokrovčke z priključkov Luer Lock Female.
5. Povežite en ali dva sistema za infuzijo z ustreznimi priključki Luer Lock.
6. Odstranite zaščitni pokrovček s podaljška Luer Lock Male in nastavite ventil v vertikalni položaj.
7. Odprite regulator pretoka sistema za infuzijo in ventil petelinčka, ter spustite zračne mehurčke.
8. Zaprite ventil.
9. Povežite petelinček s kanilo.
10. Odprite ventil petelinčka in začnite z infuzijo.
11. Po končanem postopku infuzije zaprite regulator/ja pretoka in ločite petelinček od kanile.
12. Izdelek zavržite po predpisanem postopku.

**RAZLAGA SIMBOLOV NA ETIKETAH:**



Proizvajalec



Izdelek za enkratno uporabo



Referenčna koda zasledljivosti izdelka



Rok uporabnosti izdelka (veljavnost sterilizacije)



Mesec in leto izdelave (sterilizacija)



Sterilizacija z etilen oksidom



Opozorilo (glej dodatne opombe)



V skladu s standardom EU