

ASPIRACIJSKI KATETER ŠT.1 CH08

Koda izdelka: 55405

ASPIRACIJSKI KATETER ŠT.2 CH10

Koda izdelka: 55415

ASPIRACIJSKI KATETER ŠT.3 CH12

Koda izdelka: 55425

ASPIRACIJSKI KATETER ŠT.4 CH14

Koda izdelka: 55435

ASPIRACIJSKI KATETER ŠT.5 CH16

Koda izdelka: 55445

ASPIRACIJSKI KATETER ŠT.6 CH18

Koda izdelka: 55461

ASPIRACIJSKI KATETER ŠT.7 CH20

Koda izdelka: 55475

NAVODILO ZA UPORABO

Za enkratno uporabo. Sterilno. Sterilizirano z etilen oksidom.

OPOZORILO:

Ne uporabljaj, če je ovojnina poškodovana, ali če zaščitni pokrovčki niso trdno pritrjeni. Shranjevati pri sobni temperaturi.

NAMEN UPORABE:

Aspiracijski kateter se uporablja za aspiracijo dihalnih poti.

PRIPRAVA ZA UPORABO:

1. Pred uporabo preverite, da ovojnina ni poškodovana.
2. Na označenem mestu »Odpri tukaj« odprite ovojnino in izvlecite sistem.
3. Priključite aspiracijsko cev s priključkom aspiratorja.
4. Aktivno aspiracijo izvedite skozi nosno odprtino.
5. Vzpostavite negativni pritisk s pomočjo aspiratorja.
6. Po končanem postopku prenehajte z aktivno aspiracijo, izvlecite kateter iz nosu in ga nato odstranite iz cevi aspiratorja.
7. Izdelek zavržite po predpisanem postopku.

RAZLAGA SIMBOLOV NA ETIKETAH:



Proizvajalec



Izdelek za enkratno uporabo



Referenčna koda zasledljivosti izdelka



Rok uporabnosti izdelka (veljavnost sterilizacije)



Mesec in leto izdelave (sterilizacija)



Sterilizacija z etilen oksidom



Opozorilo (glej dodatne opombe)



Izdelek vsebuje ftalate



V skladu s standardom EU