

SISTEM ZA INFUZIJO z dvokanalno iglo

Koda izdelka: 54205A

SISTEM ZA APLIKACIJO CITOSTATIKOV

Koda izdelka: 55180B

NAVODILO ZA UPORABO

Za enkratno uporabo. Sterilno, apirogeno. Sterilizirano z etilenoksidom.

OPOZORILO:


Ne uporabljaj, če je ovojnina poškodovana, ali če zaščitni pokrovčki niso trdno pritrjeni. Shranjevati pri sobni temperaturi.

NAMEN UPORABE:

Sistem se uporablja za aplikacijo infuzijskih raztopin ali zdravil iz steklene ali plastične embalaže.

PRIPRAVA ZA UPORABO:

1. Pred uporabo preverite, da ovojnina ni poškodovana.
2. Na označenem mestu »Odpri tukaj« odprite ovojnino in izvlecite sistem.
3. Preverite, da pokrovčki na igli in luer lock priključku niso poškodovani.
4. Z regulatorjem pretoka zaprite cevko do konca.
5. Odstranite zaščitni pokrovček s plastične igle.
6. Odstranite zaščitni pokrovček z vrečke ali stekleničke z infuzijsko raztopino.
7. S plastično iglo prebodite membrano infuzijske vrečke ali zamašek steklenice
8. Odprite regulator pretoka in odstranite pokrovček s priključka Luer Lock Male ter pustite, da se kapalnik napolni do polovice, oziroma da se cevka postopoma napolni z raztopino do konca. Na tak način odstranite iz sistema zrak.
9. Zaprite regulator pretoka.
10. Vizualno preverite sistem na odsotnost mehurčkov zraka.
11. Povežite priključek s kanilo, s pomočjo priključka Luer Lock.
12. Z regulatorjem nastavite hitrost pretoka.
13. Po končanem postopku infuzije ločite sistem od kanile.

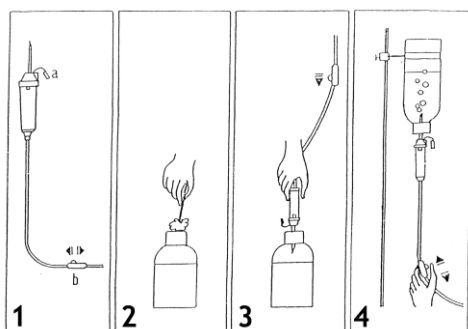

- 1 – odpri zračni filter (a) in zapri regulator pretoka (b)
 2 – pripravi površino zamaška za vbod
 3 – potisni iglo sistema v zamašek

Opozorilo: Ftalati so sestavni del tega medicinskega pripomočka. Kri, krvne sestavine, infuzijske raztopine ali druge tekočine, ki so bile zbrane, pripravljene, ali v postopku transfuzije ali infuzije z uporabo tega proizvoda, lahko vsebujejo nizke količine ftalatov in predstavljajo določeno tveganje. Največje tveganje je povezano z medicinskimi postopki pri dojenčkih, nosečnicah ali doječih materah. Uporabo medicinskega pripomočka je treba pretehtati v primerjavi s tveganjem opustitve medicinskega postopka.

RAZLAGA SIMBOLOV NA ETIKETAH:



Proizvajalec



Izdelek za enkratno uporabo



Referenčna koda zasledljivosti izdelka



Rok uporabnosti izdelka (veljavnost sterilizacije)



Mesec in leto izdelave (sterilizacija)



Sterilizacija z etilen oksidom



Opozorilo (glej dodatne opombe)



Izdelek vsebuje ftalate



V skladu s standardom EU